

Ipinapaliwanag sa paunawang ito ang kung paano gagamitin ang test na ito.
Basahin nang mabuti!

Hakbang 2 para sa inyong screening:

1 Isulat sa label ng sampling tube ang inyong apelyido, pangalan, petsa ng kapanganakan.




2 Umihi kung kailangan at pagkatapos ay ilagay ang papel sa pagkolekta ng dumi sa upuan ng inodoro gaya ng ipinapakita sa larawan.



3 Dumumi (hindi dapat mapadikit ang dumi sa ihi o tubig ng inodoro).




4 Buksan ang sampling tube habang dahan-dahang inaalis ang takip na turquoise: makikita ang sampling stick.

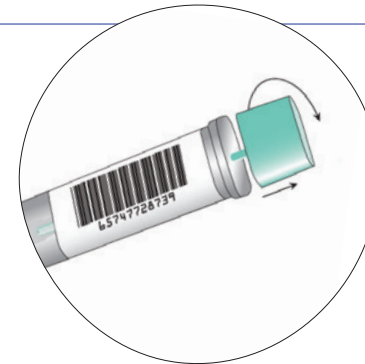


5 "Dukutin" ang mga dumi sa 5 hanggang 6 na iba't ibang bahagi ng dumi gamit ang turquoise na stick. Ang buong malukong na bahagi ay kailangang mapunan ng dumi.


Tandaan:
Magiging hindi mauunawaan ang pagsusuri kung labis ang dumi

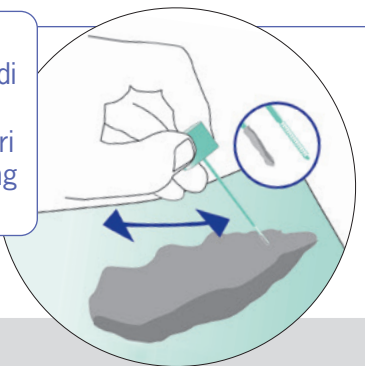


6 Ipasok ang stick sa tube at isara ito. Ang matunog na click ay magkukumpirma na naisara na nang mabuti ang tube.

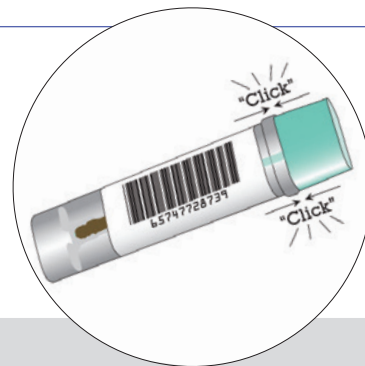

7 Alugin nang mabuti ang saradong sampling tube. Ipasok sa paketeng plastik, at pagkatapos ay ilagay sa ipapakoreong sobre.

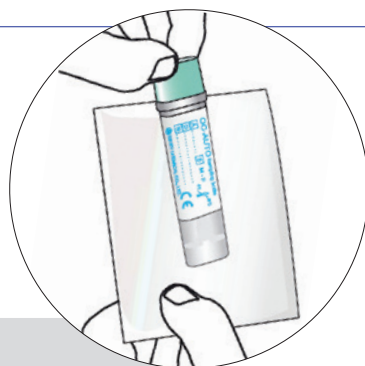

8 Ipadala sa loob ng 24 na oras ang sampling tube pati na rin ang tracking sheet sa laboratoryong tagasuri. Ginagarantiya ng mabilis na pagpapadala ang pagkamaasahan ng test.

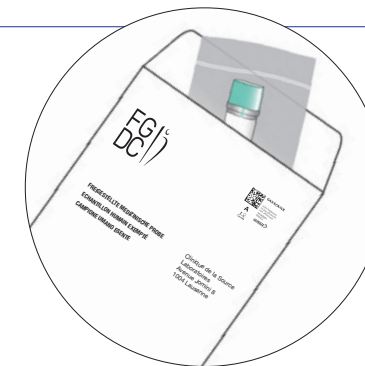

Para sa karagdagang impormasyon at mga mas detalyadong instruksyon, mangyaring makipag-ugnayan sa inyong parmasyutiko, sa inyong doktor, o sa Fondation genevoise para sa screening sa kanser - 022 708 10 90

Makakarating sa inyo ang inyong resulta sa loob ng walong araw ng tanggapan